

DESCOCEPT AF WIPES

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

- ✓ dermatologisch getestet
- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei

- aldehydfreie Schnelldesinfektionstücher mit frischem Duft
- umfassende Virenwirksamkeit inkl. Noro-Viren
- gute Hautverträglichkeit



CE 0482

PRÄPARATETYP

DESCOCEPT AF WIPES sind gebrauchsfertige, aldehydfreie Desinfektionstücher auf der Basis von Ethanol und QAV.

DESCOCEPT AF WIPES haben einen angenehmen, frischen Duft und eine gute Hautverträglichkeit. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen nach Anwendung von **DESCOCEPT AF WIPES** nahezu ausgeschlossen.

Umfangreiche Wirksamkeit gegenüber Viren, auch wirksam gegen Noro-Viren.

Als Flächendesinfektionsmittel in allen Bereichen, in denen eine schnelle Desinfektion gebraucht wird. Geeignet für:

- ärztliche und zahnärztliche Praxen (z.B. Behandlungstühle)
- Augenärztliche Praxen und Optiker zur Vorbeugung von viralen Infektionen
- Schnelldesinfektion von OP-Inventar und Operationstischen zwischen den Operationen
- Bettgestelle
- Transportmittel wie Krankentransportfahrzeuge, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge und Transportkörbe
- allgemeines Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen und Toilettensitze
- Bekleidung wie OP-Schuhe, Gummischürzen

ANWENDUNGSBEREICHE

Gem. MPG: Zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art.

ANWENDUNG

Flächen und Gegenstände mit **DESCOCEPT AF WIPES** vollständig abwischen. Die Oberflächen müssen während der erforderlichen Einwirkzeit vollständig benetzt sein.

WIRKUNGSSPEKTRUM

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT AF** wirkt:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- levurozid
- virusinaktivierend (HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-, Vaccinia-/Influenza-/Grippe-Viren, Noro-Viren)

EINWIRKZEIT

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT AF** wirkt:

bakterizid inkl. MRSA, levurozid	
gem. DGHM/ÖGHMP/VAH	1 Min.*
(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH-Liste)	
Tuberkulose-Bakterien (<i>M.terrae</i>)	1 Min.
<i>Aspergillus niger</i>	30 Min.

wirksam gegen alle behüllten Viren wie Vaccinia-, BVDV, HBV, HIV, HCV, Influenza-/Grippe-Viren

(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)	30 Sek.
Rota-/Adeno-Viren	1 Min.
Noro-Viren (MNV)	5 Min.

EINWIRKZEITEN GEM. EUROPÄISCHER NORMEN EN

Belastung	EN 1040 Bakteri- zidie	EN 1275 Levuro- zidie	EN 1276 Bakteri- zidie	EN 1650 Levuro- zidie	EN 13697 Bakteri- zidie	EN 13697 Levuro- zidie	EN 14476 Noro- Virus
niedrig	1 min.	30 sec.	1 min.	1 min.	1 min.	1 min.	5 min



DESCOCEPT AF WIPES

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

ZUSAMMENSETZUNG

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT AF** enthält in 100 g:
42,0 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid
Enthält Duftstoffe.
Inhalt: 1 Dose/Nachfüllbeutel enthält 120 Tücher á 14 x 20 cm.

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

(Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT AF**)

Aussehen: klare, farblose Lösung
pH-Wert: 7,0 +/- 1,0
Flammpunkt: 25°C

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
Spenderdose mit 120 Tüchern	12 x 1 Dose	1898486	00-312-D120
Nachfüllbeutel mit 120 Tüchern	12 x 1 Beutel	1898581	00-312-R120

BESONDERE HINWEISE

Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

GUTACHTEN

Gutachten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit

DESCOCEPT AF:

Dr. Pitten, Hygieniker, Gießen:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien.

Dr. Suchomel, Hygienikerin, Wien:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:

Gutachten zur Wirksamkeit gegenüber: Adeno-, Vakzinia-Viren, BVDV.

Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin:

Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit.

Gutachten zur Wirksamkeit gegen Noro-Viren (MNV) gem. EN 14476.

Gutachten zur bakteriziden und levuroziden Wirksamkeit gem. EN 1040/ EN 1267/ EN 1275/ EN 1650/ EN 13697.

Gutachten zur Desinfizierenden Wirksamkeit/ Standzeit mit **DESCO WIPES DT** und **ECO WIPES** gem. 4-Felder-Test.

Dr. Voss, Dermatest, Münster:

Fachärztliches, dermatologisches Gutachten (Epikutantest).

Konrad Hornschuch AG, Weißbach:

Freigabe zum Einsatz von **DESCOCEPT AF** mit Skaï® Polstermaterialien.

Bergé & Co. GmbH, Vermold:

Freigabe zum Einsatz von **DESCOCEPT AF** mit MM-Desinfektionsmatten.

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:

Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESCOCEPT AF** im **DESCO WIPES SYSTEM**; Desinfizierende Wirkung des Vliesstoffes **DESCO WIPES DT** in Kombination mit **DESCOCEPT AF**.

Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESCOCEPT AF** im **ECO WIPES SYSTEM**.

PRODUKTSTATUS/LISTUNGEN

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT AF** ist aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH und der ÖGHMP.

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT AF** ist gelistet in der aktuellen IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de).

DESCOCEPT AF WIPES ist registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baua Reg.-Nr.: N - 39455.

DESCOCEPT AF WIPES entspricht der EU-Richtlinie 93/42 EG für Medizinprodukte.

UMWELTINFORMATION

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.



DR. SCHUMACHER GMBH
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld
Telefon +49 5664 9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM